

[Inicio de la transcripción

Visual: imagen de kit de pruebas para realizar en el hogar aparece frente a un fondo morado sólido y junto al título del video: "Hisopado nasal sencillo"

Mujer con blusa azul marino y un collar, de pie en la cocina de una casa, toma un frasco de recolección y un hisopo nasal de un solo uso, sellado con plástico, de su kit.

La mujer desenrosca la parte superior del vial de recolección y, a continuación, coloca tanto la parte superior del vial de recolección como el propio vial en la mesa frente a ellos. A continuación, la mujer abre el hisopo nasal de un solo uso, sellado con plástico, sujetando la solapa de plástico transparente con una mano y tirando de la solapa de plástico blanca con la otra mano en un movimiento hacia abajo.

La mujer extrae el hisopo nasal y se lo muestra a la cámara, luego introduce la punta del hisopo nasal en una fosa nasal. Luego, la mujer gira el hisopo con un movimiento circular alrededor de todo el borde interior de la fosa nasal tres (3) veces y repite lo mismo en la otra fosa nasal.

La mujer saca el hisopo de la fosa nasal y lo coloca inmediatamente en el vial de recolección con el lado de la punta en el fondo del vial. A continuación, la mujer enrosca la parte superior del vial de nuevo en su sitio, sellando la muestra y luego muestra el vial a la cámara.

Visual: logotipo Pixel by Labcorp

Audio: a lo largo del video, suena una música de fondo alegre y sin letra.

Fin de la transcripción]